

Aloituspöas! 7 yksinkertaista vaihetta



INOGEN ONE® G2

Nyt kun olet avannut kaikki laatikot, sinulla on kaikki mitä tarvitset alkaaksesi käyttää Inogen One G2 -laitetta. Laitteen asennus onnistuu yksinkertaisesti ja nopeasti, mutta ennen kuin käytät Inogen One G2 -laitetta, lue ensin käyttöopas läpi.



1 Aseta Inogen One G2 -laite hyvin ilmastoidulle paikalle. Tarkista, että karkeasuodatin on paikoillaan.



2 Työnnä Inogen One G2 -akku paikoilleen.



3 Liitä Inogen One G2 -virtalähteen virtajohto virtalähteeseen. Liitä sitten virtalähde Inogen One G2 -laitteeseen.



4 Liitä virtalähteen virtajohto lähimpään pistorasiaan.



5 Kiinnitä happiviikset Inogen One G2:n metallisuulakkeeseen. Happea virtaa ainoastaan silloin, kun hengität laitteeseen liitettyjen happiviikien kautta.



6 Käynnistä Inogen One G2 painamalla painiketta. 



7 Säädä happivirtaus lääkärisi määräämälle tasolle. Virtausta voidaan muuttaa painamalla kolmikulmaisia happivirtauksen asetuspainikkeita, joissa on merkinnät "+" ja "-". Aseta sitten happiviikset paikoilleen ja hengitä normaalisti nenän kautta.

Käyttö autossa, veneessä ja asuntoautossa.

Kun olet oppinut käyttämään Inogen One G2 -laitetta kotona, olet valmis ottamaan laitteen mukaan.

Kuten aina, käsittele laitetta huolellisesti. ÄLÄ KIIRUHDA äläkä hosi, kun asetat Inogen One G2 -laitteen autoosi. Käytä aikaa ja seuraa oikealla olevia ohjeita. Inogen One G2 -laitteesi toimii joko akulla tai virtalähteellä, kun olet autossa, veneessä tai asuntoautossa. Jos käytät 12 voltin virtalähdettä, akku latautuu.



Liitä virtalähteen virtajohto tupakansytyttimeen tai vapaaseen 12 voltin pistorasiaan.



Liitä virtalähde Inogen One G2 -laitteeseen ja aseta laite autossa turvalliseen paikkaan. Käytä sitten Inogen One G2 -laitetta tavalliseen tapaan.



Valmistaja:

inogen

326 Bollay Drive,
Goleta, CA 93117
1-877-4-INOGEN (Toll Free)
1-877-446-6436 (Toll Free)
1-805-562-0515 (International)
info@inogen.net
www.inogenone.com
www.OxygeNation.com

Jakelija:



Medical Traders
Quality Healthcare Services

Puhelin: 040 -123 9951
Mäntymäentie 11 A
02700 Kauniainen
www.inogen.fi