

Kom-igång-guide! 7 enkla steg



INOGEN ONE® G3

Nu när du öppnat alla lådorna har du allt som krävs för att börja använda din Inogen One G3. Installationen av din maskin är enkel och snabb men innan du använder din Inogen One G3, läs igenom användarhandboken.



1 Placera din Inogen One G3 på en väl ventilerad plats. Se till att grovfiltret är på plats.



2 För in Inogen One G3-batteriet genom att skjuta batteriet på plats.



3 Anslut din Inogen One G3 nät-sladd till Power Supply. Anslut sedan Power Supply till din Inogen One G3.




4 Anslut Power Supply-nätssladden i ditt närmaste eluttag.



5 Anslut näsgrimman till metall-munstycket på din Inogen One G3. Oxygen kommer endast att levereras när du andas genom näsgrimman som är ansluten till anordningen.



6 Sätt på Inogen One G3 genom att trycka på  knappen.



7 Ställ in oxygenflödet så som din läkare har ordinerat. Flödet kan ändras genom att trycka på de triangulära flödesinställningsknapparna som är markerade med "+" och "-" symboler. Placera sedan näsgrimman i ansiktet och andas normalt genom näsan.

Bil, båt och husbilsanvändning.

När du är trygg med att använda din Inogen One G3 hemma är du redo att ta din Inogen One G3 med på vägen.

Som alltid, var en ansvarstagande förare. HA INTE BRÅTTOM och skynda inte när du ska placera din Inogen One G3 i bilen. Ta din tid och följ anvisningarna till höger. Din Inogen One G3 fungerar antingen med batteri eller med 12 V-kabeln när du är i din bil, båt eller husbil. När du använder 12 V-kabeln kommer batteriet att laddas.



Anslut 12 V-kabeln till cigarett-uttaget eller om du har extra 12 V-uttag.



Anslut 12 V-kabeln till din Inogen One G3 och placera Inogen One G3 säkert inne i bilen. Styr sedan din Inogen One G3 som vanligt.



Tillverkare:



326 Bollay Drive,
Goleta, CA 93117
1-877-4-INOGEN (Toll Free)
1-877-446-6436 (Toll Free)
1-805-562-0515 (International)
info@inogen.net
www.inogenone.com
www.OxygeNation.com

Distributör:



Medical Traders
Quality Healthcare Services

Tel: 040 -123 9951
Tallbackavägen 11 A
02700 Grankulla
www.inogen.fi