

INOGEN ONE® G3

Inogen One G3 käyttöönotto on helppoa ja nopeaa. Ennen käyttöä lue huolellisesti erillinen Inogen One G3 (IO-300) käyttöohjekirja.



1 Aseta Inogen One G3 hyvin ilmastoituun paikkaan. Varmista että molemmat partikkelisuodattimet ovat paikoillaan.



2 Aseta Inogen One® G3 akku paikoilleen liuttamalla se kuvan osoittamalla tavalla paikoilleen niin että lukko-salpa asettuu yläasentoon.



3 Kytke virtakaapeli Inogen One G3 matkahappirikastimeen



4 Aseta virtajohto pistorasiaan.



5 Kiinnitä happiviiksiletkuston toinen pää Inogen One G3 metallisuulakkeeseen. Happea virtaa ainostaan happiviiksiletkustoon kun ne on kiinnitetty Inogen One G3 laitteeseen ja hengität nenän kautta letkusto kasvoille asetettuna.



6 Käynnistä Inogen One G3 laite painamalla  painiketta



7 Säädä happivirtaus lääkärisi määräämälle tasolle. Virtausta voidaan muuttaa painamalla kolmikulmaisia happivirtauksen asetuspainikkeita, joissa on merkinnät "+" ja "-". Aseta sitten happiviikset paikoilleen ja hengitä normaalisti nenän kautta.

inogen

www.inogenone.com

Käyttö autossa, veneessä ja asuntoautossa.

Kun olet oppinut käyttämään Inogen One G3 -matkahappirikastinta kotona, olet valmis ottamaan laitteen mukaan.

Kuten aina, käsittele laitetta huolellisesti. Toimi rauhallisesti kun asetat Inogen One G3 -laitteen autoosi. Käytä aikaa ja seuraa oikealla olevia ohjeita. Inogen One G3 -laitteesi toimii joko akulla tai virtalähteellä, kun olet autossa, veneessä tai asuntoautossa. Jos käytät 12 voltin virtalähdettä, akku latautuu.



Liitä virtalähteen virtajohto tupakansytyttimeen tai vapaaseen 12 voltin pistorasiaan.



Liitä virtalähde Inogen One G3 -laitteeseen ja aseta laite autossa turvalliseen paikkaan. Käytä sitten Inogen One G3 -laitetta tavalliseen tapaan.



Valmistaja:

inogen

326 Bollay Drive,
Goleta, CA 93117
1-877-4-INOGEN (Toll Free)
1-877-446-6436 (Toll Free)
1-805-562-0515 (International)
info@inogen.net
www.inogenone.com
www.OxygeNation.com

Jakelija:



Medical Traders
Quality Healthcare Services

Puhelin: 040 -123 9951
Mäntymäentie 11 A
02700 Kauniainen
www.inogen.fi